

BVI 9400 Quick-Reference

- 1** Slå på BladderScan BVI 9400
Trykk AV/PÅ 



- 2** Velg innstilling
BladderScan BVI 9400 er laget for å scanne på tre forskjellige måter, tilpasset pasienten. Velg riktig metode for å få et så nøyaktig scann som mulig. Trykk på knappen flere ganger inntil riktig innstilling er synlig.

-  Scann mann, eller kvinne som har hatt hysterectomi
-  Scann kvinne som ikke har hatt hysterectomi
-  Scann barn som er lavere enn 122 cm og under 27 kg



- 3** Påfør ultralydgel
La pasienten ligge godt avslappet på ryggen, gjerne med overkroppen litt hevet. Lokaliser symfyisen. Påfør en passende mengde ultralydgel langs midten nederst på abdomen hos pasienten, ca 2-3 cm over symfyisen.



- 4** Sikt på blæren
Plasser sensorhodet på den påførte gelen, pekende mot forventet blæreposisjon. Sikt ned mot pasientens haleben. Når du står på pasientens høyre side, skal håndtaket på scanneren være vendt mot deg.



- 5** Trykk SCANN
Trykk på SCANN, som sitter på undersiden av proben. Når scanningen pågår, vil blæren gradvis komme til syne på skjermen. Når du hører et pip, er scanningen fullført. Hold proben helt i ro under scanningen.



BVI 9400 Quick-Reference

6

Bekreftelse av scanningen

Scanningen er godtkjent når alle 8 piler blinker i displayet på proben. Blæren vil også være synlig i sentrum av kryssiktet som sees i displayet på selve maskinen. Ingen piler vil være synlig i displayet og scanning vil da være godtkjent. Ikke behov for å scanne på nytt.

6a

Når du må scanne på nytt

Dersom scanningen ikke er nøyaktig, vil en pil komme til syne på probens lille skjerm. Pilen vil peke i den retningen proben skal bevegges. Dersom pilen er i ro, betyr det at du er litt ute av stilling. Dersom pilen blinker, er du mye ute av stilling. På apparatets display vil du se at kryssiktet ikke er i sentrum av blæren. En pil vil også være synlig. Denne viser hvilken vei du må flytte proben.

6b




Scanne på nytt

Legg merke til at den lille prikken (kl. 6) under kryssiktet på displayet skal markere pasientens føtter. Posisjon kl. 12 representerer pasientens hode. Den øvre vestre del kl. 9-12, representerer pasientens høyre skulder. Dette kan være nyttig å tenke på for enklere å få med hele blæren når man scanner.

6c

Symfyssen

Du kan også oppleve at symfyssen kommer til syne i kryssiktet når du har scannet. Det er da greit å scanne på nytt, for å være sikker på at benet ikke skjuler noe av blæren. Dette til tross for at kryssiktet er midt i blæren.

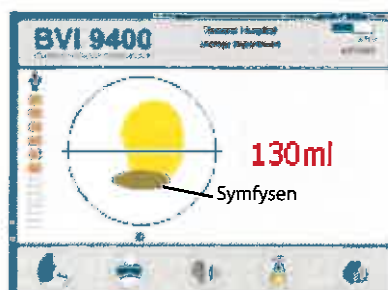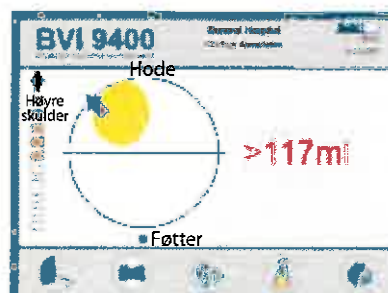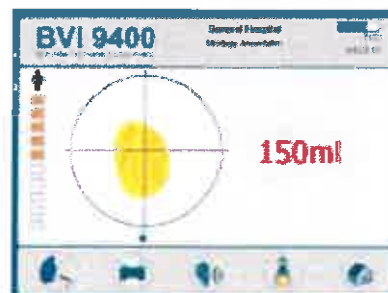

7

Lagre, se og printe ut scannede resultater


For å lagre en scanning, må du tale inn pasientinformasjonen. Trykk på og slipp opp "TAL INN" på displayet. Når du ser at "TAL INN" endres til "STOPP", tal inn pasientinformasjonen i mikrofonen på proben.

Trykk "STOPP". Når timeglasset forsvinner, trykk "LYTT" for å sjekke informasjonen.

For å vurdere bildene på scanningen, trykk "REVIEW". Du må først ha lagret scanningen for å kunne se bildene.

Trykk "PRINT" for å få en utskrift av resultatet.

Trykk "HJEM" for å scanne på nytt

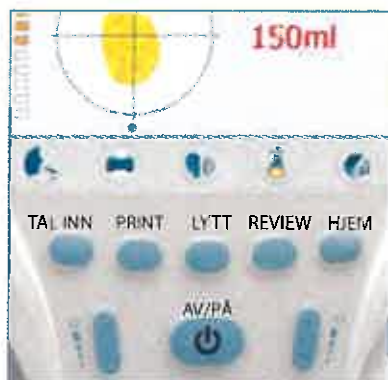

8

Avslutt undersøkelsen

Når du er fornøyd med scanningen, tørk bort ultralydgel fra pasienten og proben.



BVI 9400



For nærmere informasjon kontakt:

Wellspect HealthCare, Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Tlf: 815 59 118. Fax: 67 92 05 60. www.loftr.no

CE0123

wellspect
HEALTHCARE