

Produktinformasjon

medi



Antitrombosestrømper
mediven® thrombexin® 18

Finn rett størrelse


Mediven® thrombexin®18 finnes som lårstrømpe, knestrømpe og lårstrømpe med hoftefeste.

Obs. for pasienter med stor låromkrets, velg størrelser med ekstra vidde på låret, se måleskjema. Dersom strømpen blir for trang på låret, kan den skli ned.

Lårstrømpene med ekstra vidde på låret, er merket med grå bakgrunn i tabellen. Fargekodingen går igjen på strømper og emballasje, samt på målebånd og målekart.



Ved bruk av Thrombexin målebånd kan man se riktig størrelse direkte på målebåndet. Brukes cm målebånd, finner man størrelsen i måleskjemaet.

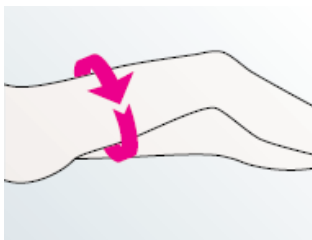

1. Begynn alltid med ankelmålet, rett ovenfor ankelknoken, der det er tynnest.
2. Ankelmålet viser på farge hvilken størrelse du skal ha.
3. Ta lårålet øverst på låret der det er tykkeast. Omkretsen viser om du skal ha normal vidde på låret eller ekstra vidde.
4. Ved knestrømper, ta et kontrollmål på leggen ved store leggomkretser. Bruk evt. cm målebånd og sjekk med målekartet.

Antitrombosestrømpen Mediven® thrombexin®18.

Antitrombosestrømper forebygger blodpropp hos pasienter som i en periode er sengeliggende, eller ikke i normal aktivitet. Trykket i antitrombosestrømper er 18 mmHg i ankelområdet, hvilket er tilstrekkelig for å øke tilbakestrømningen til hjertet når pasienten er sengeliggende.

Mange sykehus skriver ut sine operasjonspasienter med beskjed om å bruke antitrombosestrømper i en kortere periode. Hvor lang denne perioden kan være, varierer fra sykehus til sykehus, fra 2 uker til 6 mnd.

Alle antitrombosestrømper er hvite for ikke å forveksles med kompresjonsstrømper. De er ment å være en forebyggende strømpe til korttidsbruk. Trenger man strømper over lengre tid, bør man velge en kompresjonsstrømpe som holder lenger.

Størrelser

Knestrømper AD					
omkrets i cm	ankel (b)	tykklegg (c)		lengde AD	art. nr. (antall)
extra small	17-19	26 - 32		35 - 46	8040201 (10 par)
small	20 - 22	30 - 38		35 - 46	8040202 (10 par)
medium	23 - 25	34 - 44		35 - 46	8040203 (10 par)
large	26 - 28	38 - 48		35 - 46	8040204 (10 par)
large extra wide	26 - 28	44 - 55		35 - 46	8040214 (10 par)
extra large	29 - 31	44 - 55		35 - 46	8040205 (10 par)
extra, extra large	32 - 34	51 - 66		35 - 46	8040206 (10 par)
Lårstrømper AG					
omkrets i cm	ankel (b)	tykklegg (c)	lår (g)	lengde AG	art. nr. (antall)
extra small	17-19	26 - 36	40 - 50	60 - 84	8060201 (10 par)
small	20 - 22	30 - 42	48 - 60	65 - 89	8060202 (10 par)
small extra wide	20 - 22	30 - 42	56 - 70	65 - 89	8060212 (10 par)
medium	23 - 25	34 - 46	56 - 70	65 - 89	8060203 (10 par)
medium extra wide	23 - 25	34 - 46	64 - 80	65 - 89	8060213 (10 par)
large	26 - 28	38 - 51	64 - 80	65 - 89	8060204 (10 par)
large extra wide	26 - 28	38 - 51	72 - 90	65 - 89	8060214 (10 par)
extra large	29 - 31	42 - 55	72 - 90	65 - 89	8060205 (10 par)
extra large, extra wide	29 - 31	42 - 55	80 - 100	65 - 89	8060215 (10 par)
Lårstrømper med hoftefeste AG					
omkrets i cm	ankel (b)	tykklegg (c)	lår (g)	lengde AG	art. nr. (antall)
small	20 - 22	30 - 42	48 - 60	65 - 89	8062202 (5 par)
medium	23 - 25	34 - 46	56 - 70	65 - 89	8062203 (5 par)
large	26 - 28	38 - 51	64 - 80	65 - 89	8062204 (5 par)
large extra wide	26 - 28	38 - 51	72 - 90	65 - 89	8062214 (5 par)

Bruk og vask

Når Mediven® thrombexin®18 brukes for å forebygge blodpropp kan de sitte på døgnet rundt. I andre tilfeller kan de taes av om natten.

Sykehuspersonalet ved lege, sykepleier eller fysioterapeut bestemmer hvor lenge strømpene skal brukes etter utskrivning fra sykehuset.

Normalt brukes strømpene til pasienten er fullt mobilisert/har gjenopptatt normal fysisk aktivitet.

Strømpene kan vaskes i Maskin ved max 95°C. (Kompresjonen tåler ca. 10 vask ved 95°). De kan tørkes i tørketrommel, max 80°C. Ved vask og tørk på lavere temperatur har strømpene en holdbarhet på ca 2-3 måneder.

Unngå bruk av fete salver under strømpene. Trenger huden fuktighet, kan du bruke en lett fuktighetskrem.

La kremen trekke godt inn før strømpene tas på.

Egenskaper



Silikon festekant

Festekanten består av små silikonnupper som gir et godt feste slik at strømpen ikke sklir ned. Firkantene på utsiden av festebåndet skal ikke strekkes lenger enn at de beholder en kvadratisk form. Strekkes de så langt at

firkantene blir rektangulære, kan sirkulasjonen hindres. Firkantene gjør at personalet lett kan se om strømpen har blitt for stram.



Myk hel med fargekoding

For å redusere faren for trykk- og friksjonssår i helområdet, er trykket her tatt ut. Samtidig er det på innsiden av helen brukt flerlags strikketeknikk som minsker friksjonen mot helen når brukeren ligger til sengs. Strømpene er farget på helen og øverst på låret. Den samme

fargekoden finnes på måleskjema, målebånd og emballasje. Dette gjør det enkelt og sikkert å finne riktig størrelse, samt sortere strømpene etter vask.



Antibakteriell tå

En antibakteriell tråd er vevet inn i tådelen av strømpen. Dette hindrer oppvekst av bakterier og sopp i dette området. Effekten holder seg selv etter mange vask.









Inspeksjonshull

Antitrombosestrømper er alle utstyrt med hull for lett å kunne kontrollere sirkulasjonen etter en operasjon. Hullet gjør det også lettere å kunne vaske

tærne uten å ta strømpen av. Åpningen gir muligheter til å bruke silkesokk når strømpen tas på.

Hvordan ta på

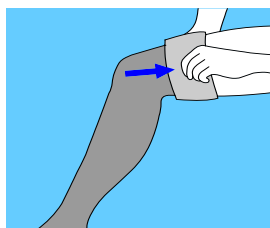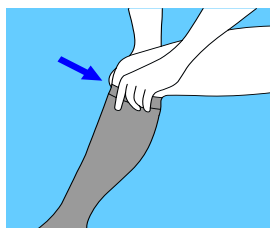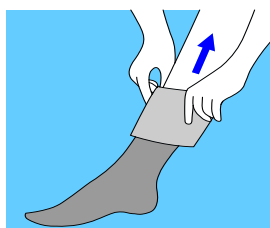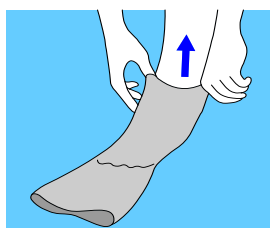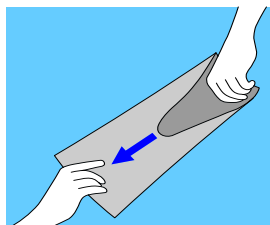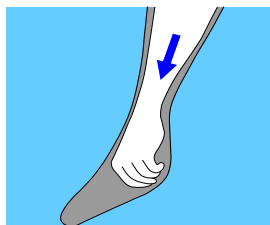

1. Stikk hånden inn i strømpen og ta fatt i helen.
2. Hold fast i helens innside og vring strømpen av armen.
3. Stikk tærne forsiktig inn i den vregnte strømpen og brett deretter strømpen tilbake over fot og hel. Sjekk at helen kommer innenfor den fargede firkanten.
4. Fordel strømpene jevnt og glatt rundt ankel og legg.
5. Knestrømper skal slutte ca. to fingerbredder under kneskålens nedre kant.
6. Lårlange strømper trekkes først opp rundt ankel og legg. Trekk deretter strømpen opp litt om gangen og juster lengden med hvor hardt du drar i den. Eventuelle rynker glattes ut.
7. **NB!** Strømpene må aldri brettes eller rulles ned. De skal enten være helt på eller helt av.
8. Sjekk med jevne mellomrom at strømpene sitter riktig på, uten rynker.

Kontraindikasjoner

Nedsatt arteriell sirkulasjon, massive ødemer i bena, lungeødem, ubehandlet hjertesvikt, lokale infeksjoner.