

Avansert hjemmesykehus for LTMV

MANUAL FOR NEDLASTNING FRA RES MED S9-SERIE (Vpap St, IVAPS, Auto Set, Auto 25, AutoSet CS) & LUMIS 150 /ST-A /AirSense

Hva:

Hjemmemaskiner til langtids mekanisk ventilasjon og til behandling av søvnapne

Tekniske data:

Applikasjon: ResScan



Kontaktpersoner:

- Medisinsk Teknisk virksomhet
- ResMed

Feil med ResScan: Sykehuspartner

NEDLASTNING AV DATA FRA NONIN PULSOKSYMETER MED APPLIKASJON NVISION

- Bruk bærbar PC merket Avansert hjemmesykehus for LTMV -sykepleier
- For å bruke programmet må du fysisk være på OUS og være koblet til OUS-nettverk
- Logg inn med eget brukernavn
- Åpne opp programmet ResScan
- Du får opp innloggingsbilde; bruk ditt vanlige brukernavn og passord:




Last ned data fra apparat ved hjelp av SD-kort. Kortet finner du bak på maskinen



eller minnepinne hvis det er Stellar



Sett SD-kortet inn i leser, på venstre side av maskinen

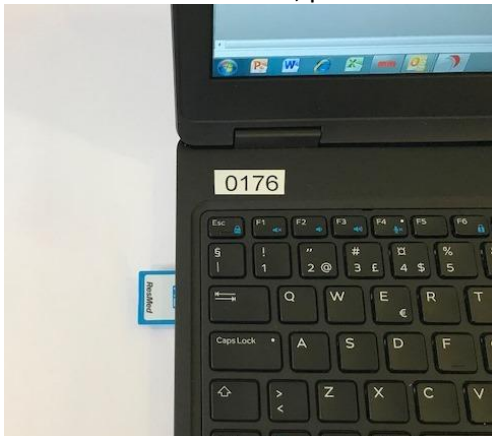

Åpne programmet ResScan



På noen maskiner vil du nå få opp en side på PC kalt Device Detected. Lukk denne


Du får nå opp en 4-trinns meny

Trinn 1. PATIENT:

- Sjekk om pasienten allerede har en pasientmappe og velg å bruke denne. Vær obs på at du har valgt mappen «Felles pasienter», ikke default eller «gamle pasienter»
→ *Open patient*: Du får opp alle data lagret på pasienten og du laster ned de siste data
- Hver pasient skal ha 1 MAPPE
- Hvis det ikke eksisterer en mappe må du opprette en ny pasientfil
→ *New patient*: Legg inn følgende data: Fornavn, etternavn, fødselsnummer og fødselsdato
- HUSK! Stor forbokstav

Trinn 2. DOWNLOAD

- På skjermbildet får du nå et nedlastningsbilde
- "Download Data"
- Velg → *Select* (den nederste)
- Deretter velger du alternativ 2 → *All summary data and the first most recent detailed data session*
- Hak av for "Include Equivalent number of high rate data sessions"
- Bekreft → *OK* → *start download*
- Nå laster du ned fra maskinen. Dette kan ta tid.
- Noen får nå et valg om du vil *overwrite* data. Velg da *overwrite*
- Lukk nedlastningsbildet → *close*

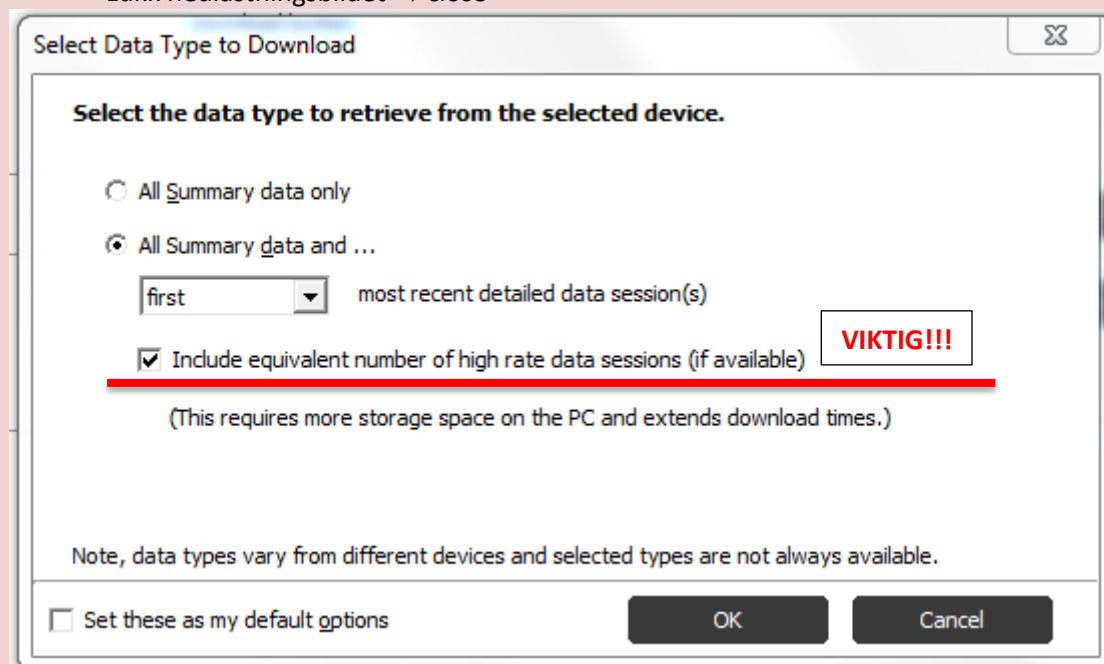

Trinn 3. REVIEW DATA

- Nå får du opp et skjermbilde med statistikk. Øverst kan du velge *viewing range*, hvor du kan velge for hvor lang tidsperiode du vil ha data.
- Ved kontroll. Velg *90 Days*
- For å sjekke siste natt. Velg *1 day*.
- Nå får du tilgang til statistikk, kurver etc. Hvis pasienten har ligget med saturasjonsmåler knyttet direkte til pasientens maskin kommer statistikk + kurve for Sp O₂ opp her.

Trinn 4. REPORT


- Velg ikon på menylinjen øverst merket → *report*

Avansert hjemmesykehus for LTMV


- Du får nå opp *Selected Detailed Data Sessions*
- *Select Report* → Velg statistical data
 - Hak av aktuelle dager du ønsker detaljerte data
 - OK

Nå skal du opprette en rapport over siste 3 måneder og lagre denne i **Fellesområde (K:)-Sensitivt – Klinikk05-19-14698_Avansert_hjemmesykehus – ResScan**

Velg rapport og klikk på *Save as* i høyre hjørne

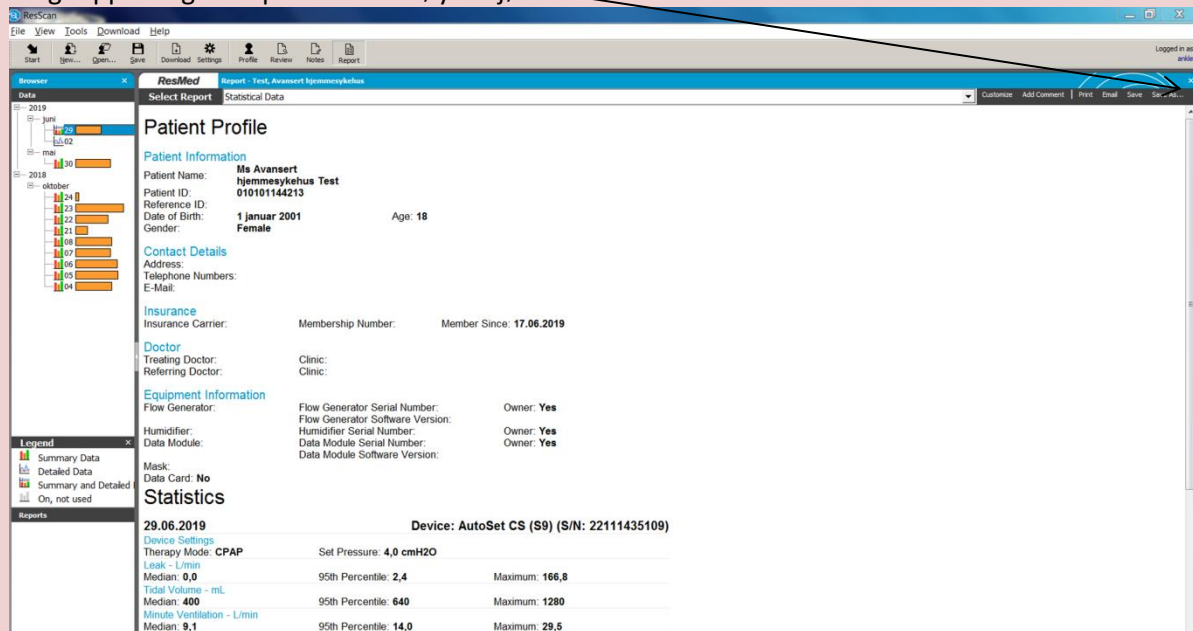


Du må lete opp riktig mappe: **Fellesområde (K:)- Sensitivt – Klinikk05-19-14698_Avansert_hjemmesykehus – ResScan- Hjemmesykehus** og lagre rapporten som pdf-fil. Merk den med fullt navn til pasienten og dato. Velg lagre

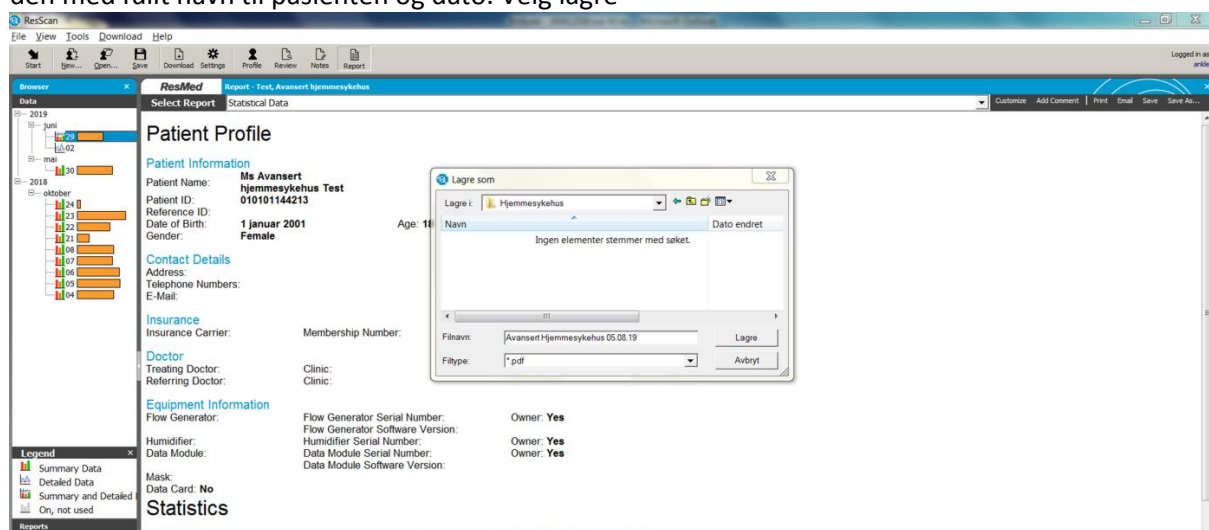


- Klikk på lagre-ikonet i Res Scan øverst på menylinjen slik at dataene du har lastet ned (inkludert detaljerte dataer) er tilgjengelige i ResScan
- Lukk programmet

- Dobbeltklikk på ikonet «Laptopsynkronisering» slik at dataene blir tilgjengelig på andre PC
- Nå skal du laste opp rapporten i DIPS fra sensitiv mappe
- Logg deg inn i DIPS
- Søk opp og aktiver riktig pasient
- Velg «Rutine» - «Journal» - «Nytt journalobjekt» fra menylinjen:

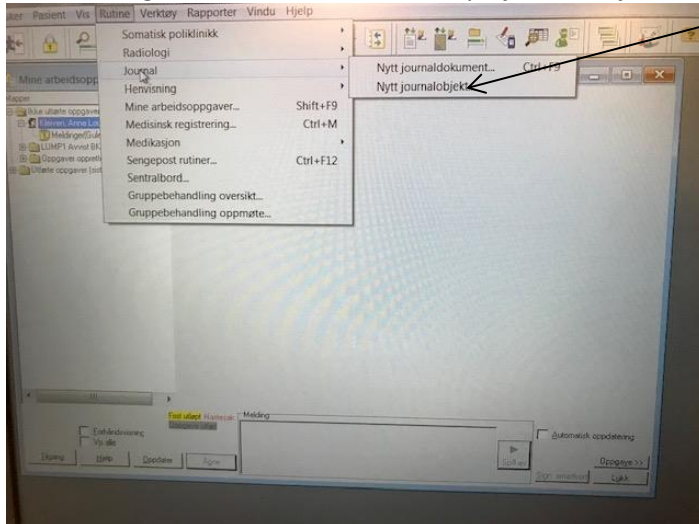

- Søk opp og velg Dokumenttype Lungeundersøkelse (imp)
- Under «Knytt til henvisning» - klikk på kikkert-ikonet og velg aktiv henvisning (LUM – Lungemedisin- Behandles)
- Under «Objekttype» velg PDF fra rullemenyen og klikk på «Hent fil»
- Nå skal du hente opp rapporten du lagret i Sensitiv mappe. Når du har lokalisert riktig dokument, marker den og klikk på «Åpne»

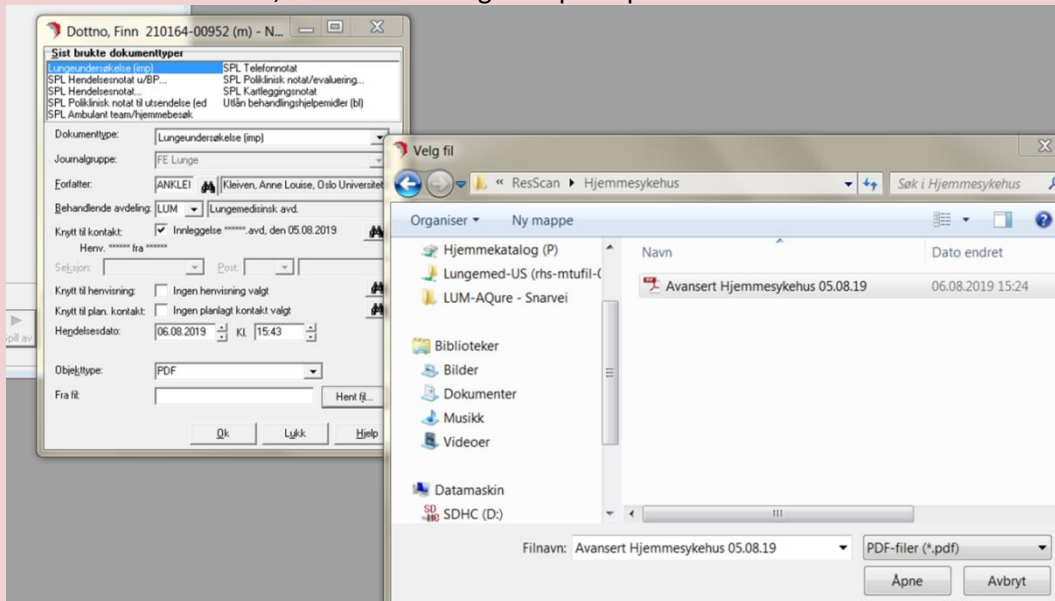

- Sjekk at du har valgt riktig fil
- Velg riktig dokumenttype «Lungeundersøkelse»
- Gi riktig benevnelse «Data fra NIV-maskin/Respirator (ResScan/Prisma)
- Klikk så på «Lagre» i DIPS

Dottno, Finn 210164-00952 (m) - Nytt journalobjekt

Sist brukte dokumenttyper

Hjerte kretsløp notat...	SPL Telefonnotat
SPL Tilsynsnotat...	Sjekkliste pasientsikkerhet (bl)
SPL Notat/evaluering...	Svar på forespørsel
PLO Helseopplysninger	Forespørsel
SPL Kartleggingsnotat	Utlån behandlingshjelpemidler (bl)

Dokumenttype: Lungeundersøkelse (imp)

Dokumentbetegnelse: Data fra NIV-maskin/respirator (ResScan/Prisma)

Journalgruppe: FE Lunge

Forfatter: ANKLEI Kleiven, Anne Louise, Oslo Universitets

Behandelnde avdeling: LUM Lungemedisinsk avd.

Knytt til kontakt: ☒ Innleggelse ***** avd, den 05.08.2019

Henv. ***** fra *****

Seksjon: Post:

Knytt til henvisning: ☐ Ingen henvisning valgt

Knytt til plan. kontakt: ☐ Ingen planlagt kontakt valgt

Hendelsesdato: 28.08.2019 Kl. 15:21

Objekttype: PDF

Fra fil: 8 June 2019 07 45 41 - 07 58 29.pdf Hent fil...

Lagre Lukk Hjelp

- Dokumentet er nå lastet opp i DIPS og er tilgjengelig for alle dine kolleger

Dottno, Finn 210164-00952 (m) - DIPS: Oslo universitetssykehus (Kopi: 18.02.2019)

Braker Pasient Dokument Rediger Vis Rutine Verktøy Rapporter Vindu Hjelp

Mine arbeidsoppgaver / Ikke utførte oppgaver

Mapper

- Ikke utførte oppgaver
- Utlån: Anne Louise (ANKLEI)
- Meldinger (Siste løp) (1/29)
- LUMPI Avvist BKM
- Oppgaver opprettet av meg
- Utførte oppgaver (siste 30 dager)

ResScan™

Name: Ms Avansert hjemmesykehus Test
Patient ID: 010101144213
Reference ID:
Date of Birth: 1 januar 2001
Report prepared by: anklei on 06.08.2019 at 15:24

Patient Profile

Patient Information

Patient Name: Ms Avansert hjemmesykehus Test
Patient ID: 010101144213
Reference ID:
Date of Birth: 1 januar 2001 Age: 18
Gender: Female

Contact Details

Address:
Telephone Numbers:
E-Mail:

Insurance

Insurance Carrier: Membership Number: Member Since: 17.06.2019