


CODAN Mix-Ad Guard® Skyllsett 254813CD

Bruksanvisning for blanding i NaCl (og Sterilt Vann)



1

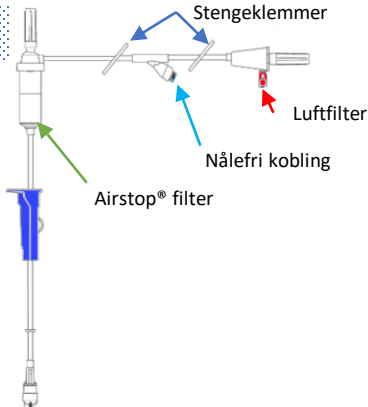

Du trenger:


Mix-Ad Guard® Skyllsett

- Sprøyte 20ml- Luer-Lock
- NaCl pose
- Hetteglass med tørrstoff
- (sterilt vann)

• (Bruksanvisningen forutsetter kunnskap i hvordan å fylle et vanlig Mix-Ad sett)



2

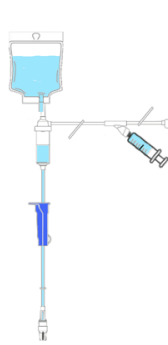


Steng rød lufterventil og stengeklemme nærmest medikament-spike. Fyll settet som vanlig. Sett sprøyten i nålefri port og trekk ut)* ca 20ml NaCl til skylling, fra posen.


)* Dersom du skal blande tørrstoff med sterilt vann, må du trekke opp dette fra en annen kilde og sette denne sprøyten i porten.

La sprøyten stå i porten.


3

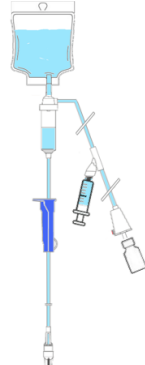

Sett spike ned i hetteglasset: Ikke sett spiken helt ned i glasset. Innholdet tømmes bedre.

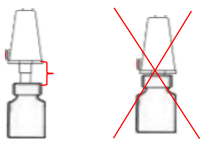


4

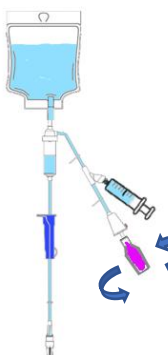

Åpne skyveklemme og luftfilter og fyll hetteglasset 2/3. Bland forsiktig tørrstoff med væske. (Dersom du vil blande med sterilt vann, tømmer du innholdet i sprøyten til glasset. Trekk deretter ut 20ml NaCl fra posen inn i sprøyten.)


Bland forsiktig tørrstoff med væske.

5

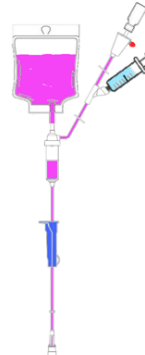


Åpne rød lufterventil og la innholdet i hetteglasset renne i NaCl posen. Steng deretter begge stengeklemmene og lufterventilen.

6

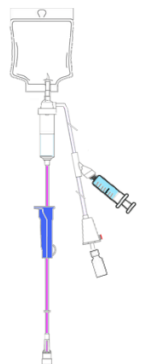

Når posen er tom, vil Airstop®-filteret sørge for at luft ikke går i slangen.

7

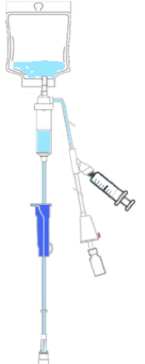

Åpne stengeklemmen nærmest kammeret og sett de 20ml med ren NaCl inn i posen. Åpne rulleklemme og sett inn siste restvolum. La den tomme sprøyten og hetteglasset henge på settet. Du kan nå kaste settet i henhold til foretakets retningslinjer.