

BRUKSANVISNING ECOFLAC® CONNECT

SKYLLESETT

Utblanding av medikament i et dokumentert lukket system, med etterskylling.



1

Finn frem:

- Ecoflac® plus beholder
- Ecoflac® Connect overføringsadapter - riktig størrelse
- Skyllesett, artikkel 4110000
- Legemiddel



5

- Rist - slik at medikamentet løses opp.
- Hold systemet med medikamentglasset øverst. Press på beholderen, og det oppløste medikamentet renner tilbake til beholderen.
- Gjenta punkt 4 og 5 ved behov.



2

- Fjern de to metallbeskyttelsene på Ecoflac® plus beholder og avdekk de sterile tilsetnings- og infusjonsområdene
- Koble Ecoflac® Connect til beholderen slik at den sitter godt festet
- Koble til medikament hetteglasset (skal desinfiseres)
- Monter infusjonssettet. Lufteventil og rulleklemme skal være



6

- Heng opp Ecoflac® plus beholderen, koble infusjonssettet til pasienten og start infusjonen.



3

- Fyll halve dråpekammeret med nøytral løsning fra Ecoflac® plus beholderen. Fyll infusjonssettet.



4

- Hold deretter systemet vannrett, med medikamentglasset pekende svakt nedover.
- Press kraftig på beholderen slik at medikamentglasset fylles og lufteventil



7

- Når infusjonen er avsluttet, steng hvit lukkeklemme over dråpekammer. Desinfiser den nålefrie membranen, koble til sprøyte (gjærne med luer lock kobling) fylt med minimum 10 ml NaCl 9 mg/ml.
- Press sprøytens innhold inn i dråpekammeret - til skylling av settet.
- Når dråpekammeret er tømt, stenges rulleklemmen.

¹ NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health).

² Test Report Quality labs & GmbH, oppgave 1432

³ Expert report DMT 2014-038, Evaluation of the microbial barrier performance of the drug admixture system Ecoflac Connect against spores of Bacillus subtilis (ATCC 6633). (Internal microbial investigation no. 4.3 A)

BRUKSANVISNING ECOFLAC® CONNECT

STANDARD INFUSJONSSETT/PUMPSETT

Utblending av medikament i et dokumentert lukket system



Finn frem:

- Ecoflac® plus beholder
- Ecoflac® Connect overføringsadapter - riktig størrelse
- Infusjonssett
- Legemiddel



- Hold deretter systemet vannrett, med medikament- glasset pekende svakt nedover.
- Press kraftig på beholderen slik at medikamentglasset fylles ca. kvart med væske.



- Fjern de to metallbeskytt- elsene på Ecoflac® plus beholder og avdekk de sterile tilsetnings- og infusjonsområdene
- Koble Ecoflac® Connect overføringsadapter til beholderen slik at den sitter godt festet med gripetakene.
- Koble til medikament hette glasset (skal desinfiseres)
- Monter infusjonssettet. Lufteventil og



- Rist - slik at medikamentet løses opp.
- Hold systemet med medikamentglasset øverst. Press på beholderen, og det oppløste medikamentet renner tilbake til beholderen.



- Fyll halve dråpekammeret med nøytral løsning fra Ecoflac® plus beholderen. Fyll infusjonssettet.



- Heng opp Ecoflac® plus beholderen, koble infusjons- settet til pasienten og start infusjonen.

¹ NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health).

² Test Report Quality labs & GmbH, oppgave 1432

³ Expert report DMT 2014-038, Evaluation of the microbial barrier performance of the drug admixture system Ecoflac Connect against spores of Bacillus subtilis (ATCC 6633). (Internal microbial investigation no. 4.3 A)

PRODUKTSORTIMENT DOKUMENTERT LUKKET SYSTEM

Ecoflac® Connect
Intrafix® safeset
Intrafix® skyllesett

	Produkt:	Tilpasset medikamentglass:	Artikkelnr:	Pakn. str.
	Ecoflac® Connect liten	Diameter 13 mm	4090549	50 stk
	Ecoflac® Connect medium	Diameter 20 mm	4090550	50 stk
	Ecoflac® Connect stor	Diameter 32 mm	4090552	50 stk
	Intrafix® Safeset Skyllesett m. ventil		4110000	25 stk
	Intrafix® Safeset, Std. Infusjonssett		4063000	100 stk