


Kortbruksanvisning, Texium™ og SmartSite™

INFUSJON

1.

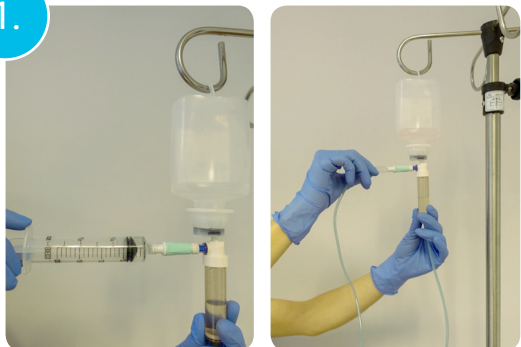

Sett infusjonssettet med SmartSite nålefri ventil inn i infusjonsposen og fyll dråpekammer og infusjonssett. Trekk deretter ut ønsket mengde blandingsvæske i valgt Texiumsprøyte. Brukes infusjonssett med Texium fastmontert, skal Texiumdelen kobles til SmartSite ventilen på dråpekammeret, for å fylle infusjonssettet.

2.



Sett ønsket hetteglassadapter på hetteglasset. Desinfiser så toppen av SmartSite ventilen.

3.



Koble Texiumsprøyten med blandingsvæsken til SmartSite på hetteglassadapteren. Injiser alltid væske til hetteglass som vist på bildet: fra topp og ned til hetteglasset. Løs opp pulver.

4.



Vend så hetteglasset opp ned og trekk opp ønsket mengde utblandet legemiddel i sprøyten. Kontroller at det ikke er luft igjen i sprøyten før frakobling.

5.



Injiser legemiddel fra Texiumsprøyten til infusjonsposen via SmartSite på dråpekammeret, og koble deretter fra sprøyten, sett en steril hette på infusjonssettet.

6.



Desinfiser den nålefri ventilen på pasientens IV-tilgang. Når ventilen er tørr, kobles infusjonssettet til pasienten, og infusjon startes.

Kortbruksanvisning, Texium™ og SmartSite™

BOLUSINJEKSJON

1.



Desinfiser toppen av hetteglasset og la det tørke.

2.



Trekk opp ønsket mengde blandingsvæske i en steril Texiumsprøyte.

3.



Sett ønsket hetteglassadapter på hetteglasset. Desinfiser så toppen av SmartSite ventilen.

4.



Koble Texiumsprøyten med blandingsvæsken til SmartSite på hetteglassadapteren. Injiser alltid væske til hetteglass som vist på bildet: fra topp og ned til hetteglasset. Løs opp pulver.

5.



Vend så hetteglasset opp ned og trekk opp ønsket mengde utblandet legemiddel i sprøyten. Kontroller at det ikke er luft igjen i sprøyten før frakobling.

Etter frakobling settes en steril hette på Texiumsprøyten.

6.



Desinfiser den nålefreie ventilen på pasientens IV-tilgang. Koble til Texiumsprøyten og injiser legemiddel.

Viktige tips:

- Desinfiser med 70 % alkohol og la det tørke.
- Ved påkobling av hetteglassadapteren; sett alltid spiken midt i hetteglassmembranen, i en rett vinkel. Brukes universaladapteren; pass på at adapteren sitter tett på hetteglassmembranen.
- Injiser alltid væske med hetteglasset rett opp og ned, for å unngå at man får væske i filteret.
- Ved frakobling; hold alltid fast i både Texium-koblingen og SmartSite-ventilen.
- Ved eventuell luft i sprøyten, må denne fjernes FØR man kobler sprøyten fra hetteglassadapteren .

Produkter

Texium™ sprøyte & Texium™ Lukket Hanluer

Beskrivelse	Størrelse (ml)	Artikkelnummer BD
Texium sprøyte	3	MY8003-0006
Texium sprøyte	5	MY8005-0006
Texium sprøyte	10	MY8010-0006
Texium sprøyte	20	MY8020-0006
Texium sprøyte	30	MY8030-0006
Texium sprøyte	50	MY8060-0006
Texium lukket hanluer	-	10012241

Hetteglassadapter

Beskrivelse	Størrelse hals (mm)	Artikkelnummer BD
Hetteglassadapter	Universal	MV0400-0006
Hetteglassadapter	13	MV0413-0006
Hetteglassadapter	20	MV0420-0006
Hetteglassadapter	28	MV0428-0006

Hetteglassadapter

Beskrivelse	Artikkelnummer BD
Bagspike	10013365-0006

BD Norway AS, Fjordveien 3, 1363, Høvik, Norge

bd.com

