

Quick Guide - TetraGraph

Quantitative emg neuromuscular blockade monitoring



1 Slå monitoren på




Pass på at batteriet er tilstrekkelig oppladet. Hvis ikke, kobler du til strøm ved hjelp av USB- og strømforsyningsadapteren. Kontroller også innstillingene for å være sikker på at de passer dine behov.

2 Koble pasientkabelen til monitoren




Pass på at kabelen har riktig retning. Hvis du må fjerne kabelen, trekker du den ytre ringen på kontakten tilbake før du trekker den ut av porten.

3 Plasser elektrodene på hånden

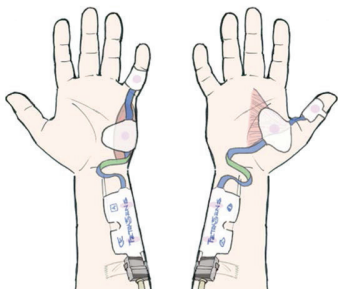

Rengjør huden grundig og tørk den helt. Riv opp posen til TetraSens-pakken. Plasser de ovale stimuleringselektroden over ulnarnerven. Sett registreringselektroden (distal, rund) på ADM- eller AP-muskelen og referanseelektroden over leddet eller beinet.

4 Koble kabelen til elektrodene

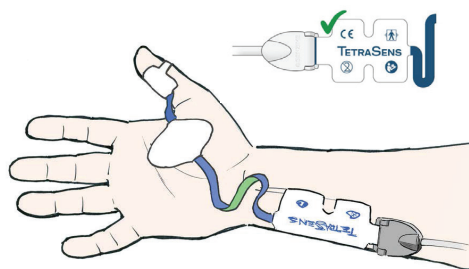


Sett den blå delen av elektrodene helt inn i kabelkontakten. Pass på å overvinne enhver motstand, og pass på at den sitter rett. Fest kabelen til overarmen med teip for å redusere belastningen på kontakten som følge av bevegelse.

Quick Guide - TetraGraph

Quantitative emg neuromuscular blockade monitoring




5 Trykk "play" for å starte å overvåke

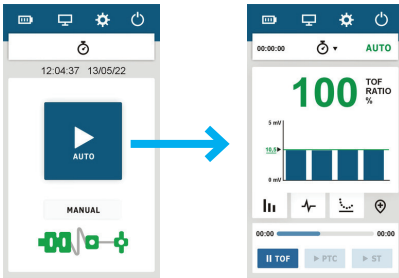


Monitoren vil velge optimale stimuli og angi en grunnlinje. Grunnlinjen T1 vises i grønt når den er >5 mV. Den første TOF-verdien vil vises innen få sekunder.

6 Overvåk pasienten

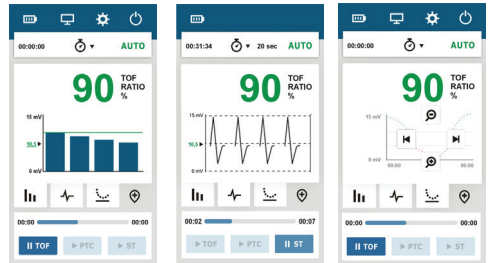


Under overvåkingen kan du velge å vise dataene på tre ulike måter: søylediagram, kurveform (EMG) eller trenddiagram.

7 Kjør ptc-modus hvis aktuelt

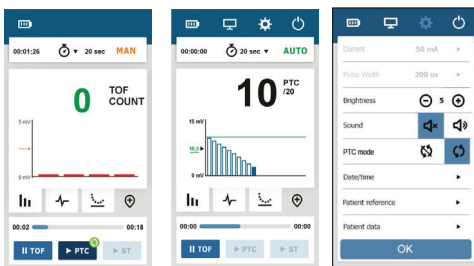

Ved TOFC 0 blir Post Tetanic Count (PTC)-funksjonen aktivert for å overvåke dyp blokad. Både gjentatt PTC og PTC på forespørsel er tilgjengelig, og du kan enkelt endre funksjonene i Innstillinger

8 Slå av eller velg ny pasient

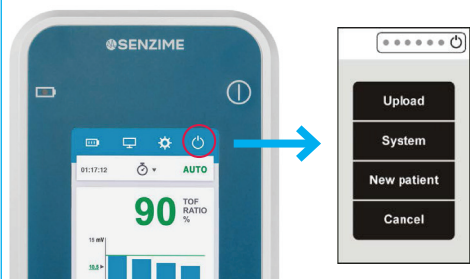

Når overvåkingen er ferdig, velger du ny pasient eller slår av enheten med AV-knappen øverst til høyre på skjermen. Hvis du kobler enheten til igjen >5 minutter etter siste tilkobling, kan du velge å fortsette med samme pasient eller velge ny