

Prøvetakingsinstruks politi


Det må brukes prøvetakingsutstyr fra Avdeling for rettsmedisinske fag OUS.



Kontroller **prøvegivers identitet**, og skriv navn og fødselsnummer på rekvisisjonen. Skriv tydelig, med blå eller svart penn.



Ta prøvene. Merk og forsegle rørene med forseglingsetikett fra rekvisisjonen.

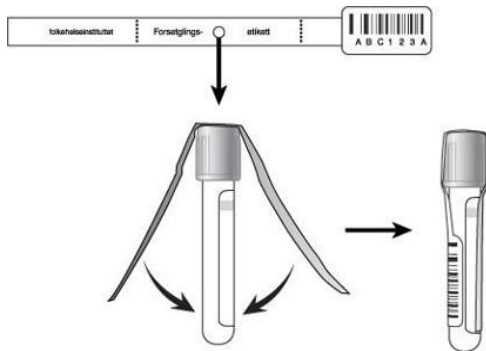

OBS Du kan ikke bruke etiketter fra en annen rekvisisjon. Saks-ID på rørene og rekvisisjonen må stemme overens.



Skriv dato og tidspunkt for hvert rør på rekvisisjonen.



Legg prøverørene i plastboksen, merk plastboksen med saks-ID, legg den i sikkerhetsposen og lim igjen.



Fyll ut resten av rekvisisjonen.

Pakk og send (se Innpakningsinstruks).

Oppbevar prøvene i kjøleskap og et område med adgangskontroll inntil forsendelse.

Scan QR-koden til høyre for mer informasjon og analyseprogram.



Scan QR-koden til høyre for demonstrasjonsfilm.



Legeundersøkelse?

Klinisk legeundersøkelse bør utføres når det skal vurderes påvirkningsgrad og dere mistenker noe annet enn bare alkohol. Undersøkelsen er på side to og tre av rekvisisjonen. Disse sidene **skal** sendes inn med rekvisisjonen selv om undersøkelsen ikke er utført.

Blod

Fyll så mye blod som mulig i fortrinnsvis **minst tre** prøverør med grå kork.

Vend rørene noen ganger rett etter prøvetakingen.

Forsegle prøverørene med forseglingsetikett fra rekvisisjonen. Noter prøvetakingstidspunkt på rekvisisjonen for hvert rør. Nå har hvert rør en identitet som kan knyttes til informasjonen på rekvisisjonen.

Det er nok å ta blodprøver på ett tidspunkt. Tidligere praksis med to blodprøvetidspunkt har blitt avviklet.

Urin

Urin avgis i stort beger med gult lokk. Skru av lokket og la prøvegiver avgi urin rett i begeret, minst 50 ml. Skru på lokket.

For å kontrollere mot prøvemanipulasjon bør temperaturen avleses (temp.måler er på begeret). Temperaturen skal være mellom 32,5°C og 37°C de første fire minuttene etter at prøven er avgitt.

Prøverørene med gul kork skal fylles med urin fra begeret – se illustrasjonen. Urinrørene har vakuum, og **korkene må ikke tas av**. Rør uten vakuum lar seg ikke fylle.

For å fylle prøverørene fjernes klistrelappen på begeret, og prøverøret trykkes med korken ned over nålen i begerets lokk.

