

Rengjøring av NOX T3 og tilhørende enheter

Rengjør T3-enheten med en myk klut med sykehusklassifisert rengjøringsmiddel som ikke er etsende på plast eller metall. Ikke hell over eller spray noen form for væske på enheten, pass på at ingen væske kommer inn i åpningene på enheten. La enheten tørke skikkelig før bruk.

Nesekateteret er koblet til enheten med ett filter ved inngangen til enheten. Bruk av dette er anbefalt og hindrer at enheten blir dekontaminert.

Oppbevaringsvesken kan rengjøres med en fuktig klut med vann eller mild såpe.

Alle NOX kabler som brukes med T3-enheten er beregnet for gjenbruk. Rengjør kablene med en fuktig klut med sykehusklassifisert rengjøringsmiddel, ikke sprit. Ikke senk kablene i væske. Pass på at fuktighet ikke kommer inn i kontaktpunktene, om dette skjer pass på at dette får tid til å tørke før bruk.

RIP belter kommer i to versjoner. Engangs og flergangs (delvis gjenbrukbare).

De delvis gjenbrukbare RIP-beltene kan gjenbrukes inntil 5 ganger, og bør rengjøres mellom ulike pasienter. Beltene kan håndvaskes eller vaskes i maskin hvis man bruker vaskepose. Bruk en mild såpe. Vasketemperaturen skal ikke overstige 30 °C. Ikke bruk tørketrommel.

RIP engangsbelter og nesekateter med tilhørende filter er anbefalt til kun en pasients bruk. Dette av hensyn til hygiene og kvalitet på registrering.

Merk:

- Separér enheten fra tilhørende sensorer før rengjøring.
- Hverken enheten eller sensorer skal autoklaveres eller senkes i noen form for væske.
- Ikke bruk slipende eller etsende rengjøringsmidler på enheten eller noen av delene.
- NOX T3-komponentene er IKKE ment for sterilisering.
- Å bruke engangsutstyr til mer enn en pasient kan utgjøre smittefare.

Rengjøringsinstruksjon for Nonin soft sensor

1. Vask alle sensorens kontaktflater. Bruk en myk klut fuktet med en mildt vaskemiddel, isopropylalkohol eller en løsning med 10% blekemiddel*/10% vann.

***Husholdningsblekemiddel inneholdende mindre enn 10% natriumhypokloritt**

2. La sensoren tørke helt før bruk etter vask.

Merk:

- Vask kabelen forsiktig fra pluggenden mot sensorenden. Dette for å minske forringelse av produktet.
- Vask sensoren mellom ulike pasienters bruk
- Ta ut sensor kontakten før rengjøring
- Ikke steriliser, autoclaver eller senk sensoren i noe væske. Ikke hell eller spray på noe type væske på sensoren.
- Ikke bruk kaustisk eller slipende vaskemidler på sensoren. Ikke bruk vaskemidler som inneholder ammoniumklorid. Bruk av midler som inneholder de nevnte midler kan korte livslengden på produktet.